













Schimbarea unitatii de masura:

1. Apasati butonul  pentru a deschide aparatul.
2. Asteptati 10 secunde, pana cronometrul de pe ecran ajunge la 0
3. Cand pe ecran apare **Blow** si simbolul **C** care se deplaseaza pe ecran, apasati tasta . Pe ecran este afisat acum **0** (zero)
4. Apasati simultan tastele  si . Pe ecran apare **0000**.
5. Apasati tasta  pentru a transforma primul **0** in **1**. Apasati tasta  pentru a trece la urmatorul
0. Apasati din nou  pentru a transforma al doilea 0 in 1. Procedati astfel pana **0000** devine **1111**.
6. Apasati , apoi . Apasati de mai multe ori tasta  pana gasiti in partea de jos a ecranului unitate de masura dorita (mg/ml, **mg/L**, g/L, % BAC, % BAC).
7. Apasati  pentru a confirma setarea. Acum valorile masurate vor fi in mg/l (daca ati selectat aceasta unitate).

Schimbarea pragului minin de alarma:

Repetati pasii 1, 2, 3 si 4. Schimbati **0000** in **1112**. Apasati tasta  pana ajungeti la valoarea cea mai mica 0.01 (mg/L).